

BTE 105

Aides auditives contour d'oreille

VIRON



Made for

iPhone | iPad | iPod

Mode d'emploi

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Introduction

Ce mode d'emploi vous indique comment utiliser et entretenir vos nouvelles aides auditives. Veuillez le lire attentivement, y compris la section Avertissements. Il décrit comment utiliser au mieux vos aides auditives.

Votre audioprothésiste a ajusté vos aides auditives de manière à répondre à vos besoins. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez consulter votre audioprothésiste.

Un professionnel de l'audition* (audioprothésiste, audiologiste, ORL (oto-rhino-laryngologiste) et distributeur d'appareils auditifs) est une personne qui a reçu une formation appropriée et qui a prouvé ses compétences en matière d'évaluation professionnelle de l'audition, de sélection, d'adaptation et de fourniture d'appareils auditifs et de soins de rééducation aux personnes souffrant d'une perte auditive.

La formation du professionnel de l'audition est conforme aux réglementations nationales ou régionales.

* Le titre du poste peut varier d'un pays à l'autre.

Aperçu du modèle

Ce manuel couvre les gammes et les modèles d'aides auditives suivants :

Viron FW4

- Viron 9 – VN9 B 105
GTIN : (01)05714464021253
- Viron 7 – VN7 B 105
GTIN : (01)05714464021260
- Viron 5 – VN5 B 105
GTIN : (01)05714464021277
- Viron 3 – VN3 B 105
GTIN : (01)05714464021284
- Viron 1 – VN1 B 105
GTIN : (01)05714464021291

Utilisation prévue

Utilisation prévue	L'aide auditive a pour but d'amplifier les sons et de les transmettre à l'oreille.
Indications	Perte auditive bilatérale ou unilatérale de type neurosensoriel, conductif ou mixte allant d'une perte auditive légère (16 dB HL*) à profonde (85 dB HL*), avec une configuration fréquentielle individuelle.
Utilisateur prévu	Personne souffrant d'une perte auditive et utilisant une aide auditive et ses aidants. Audioprothésiste chargé de régler l'aide auditive.
Groupe d'utilisateurs prévu	Adultes et enfants de plus de 36 mois.
Environnement d'utilisation	Intérieur et extérieur.
Contre-indications	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Les utilisateurs d'implants actifs doivent faire part d'une prudence particulière lors de leur utilisation de l'aide auditive. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section Avertissements .
Avantages cliniques	L'aide auditive est conçue pour offrir une meilleure compréhension de la parole afin de faciliter la communication dans le but d'améliorer la qualité de vie.

* Comme spécifié par l'American Speech-Language-Hearing Association, asha.org, en utilisant une moyenne de sons purs de 0,5, 1 et 2 kHz

Remarque importante

L'amplification de votre aide auditive est ajustée et optimisée de manière unique, selon vos capacités auditives personnelles, pendant l'adaptation effectuée par votre audioprothésiste.

Sommaire

Identifiez votre aide auditive et votre embout	10
Votre aide auditive avec coude et embout	12
Son rôle	13
Votre aide auditive avec tube fin miniFit	14
Son rôle	15
Identifier l'aide auditive gauche et droite	16
Pile (type 13)	17
Allumer et éteindre l'aide auditive	18
Quand remplacer une pile	19
Remplacer la pile	20
Mettre l'aide auditive avec coude	22
Outil Multi Usages pour manipuler les piles et pour le nettoyage	23
Entretien de votre aide auditive	24
Tube fin miniFit	27
Embouts standard pour tube fin	30


Remplacer le dôme ou Grip Tip	31
Embouts personnalisés pour tube fin	32
Nettoyage du Micro Mold	33
Remplacer le filtre ProWax	34
Mode avion	35
Fonctions et accessoires optionnels	36
Changer le volume (optionnel)	37
Changer le programme (optionnel)	38
Mettre l'aide auditive en mode silencieux (optionnel)	40
Réinitialisation rapide et mode appairage	41
Utiliser l'aide auditive avec un iPhone, iPad et iPod touch	42
Appairer l'aide auditive et l'iPhone	43
Reconnecter vos aides auditives à votre iPhone, iPad ou iPod touch	46
Accessoires sans fil (optionnels)	47
Autres options (optionnel)	48
Logement de pile de sécurité (en option)	49

Tinnitus SoundSupport (optionnel)	51
Directives destinées aux utilisateurs de Tinnitus SoundSupport	52
Options de son et réglage du volume	53
Limite de durée d'utilisation	55
Informations importantes destinées aux audioprothésistes à propos de Tinnitus SoundSupport	56
Avertissements liés à Tinnitus SoundSupport	58
Avertissements généraux	60
Guide de dépannage	68
Résistance à l'eau et à la poussière (IP68)	70
Conditions d'utilisation	71
Certificat de garantie	72
Garantie internationale	73
Informations techniques	74
Paramètres de votre aide auditive personnelle	76


Identifiez votre aide auditive et votre embout

Il existe deux systèmes de connexion différents et plusieurs dômes qui déterminent le type de votre aide auditive. Veuillez identifier votre connexion et votre dôme. Cela facilitera votre lecture de ce mode d'emploi.

Coude avec embout

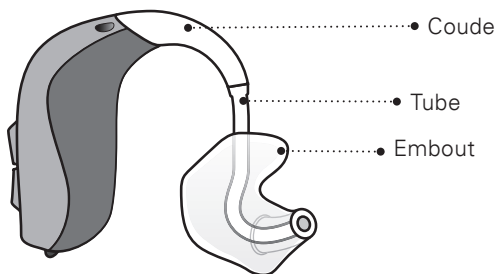

Tube fin miniFit

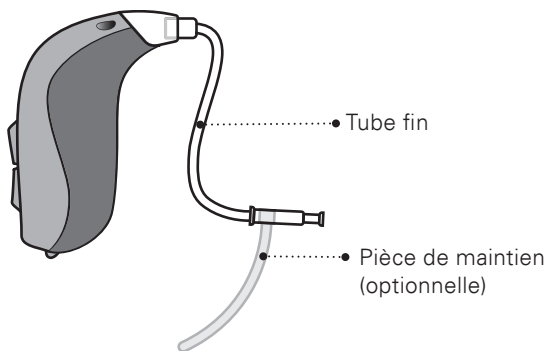

Embouts

Le tube fin utilise l'un des embouts suivants :



Dôme (dôme fermé illustré)*



Grip Tip*




VarioTherm® Micro Mold




Micro Mold

* Pour remplacer le dôme ou le Grip Tip veuillez vous référer à la section : « Remplacer le dôme ou le Grip Tip ». VarioTherm® est une marque déposée de Dreve.


Votre aide auditive avec coude et embout

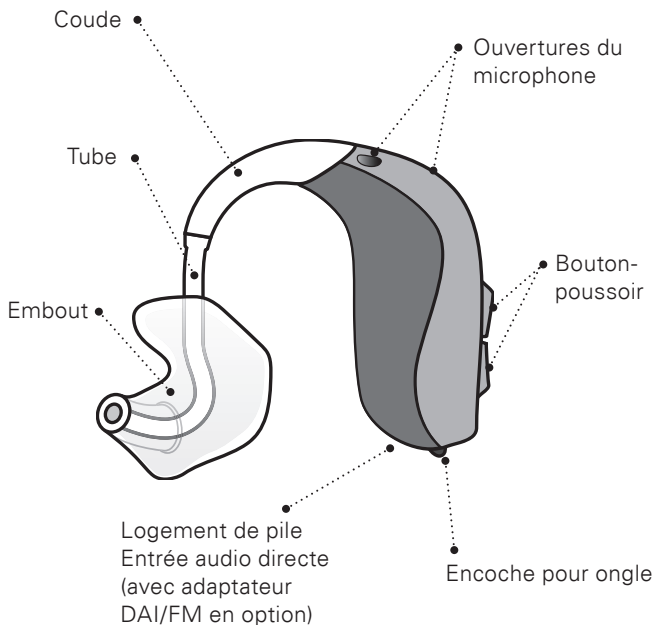


Son rôle

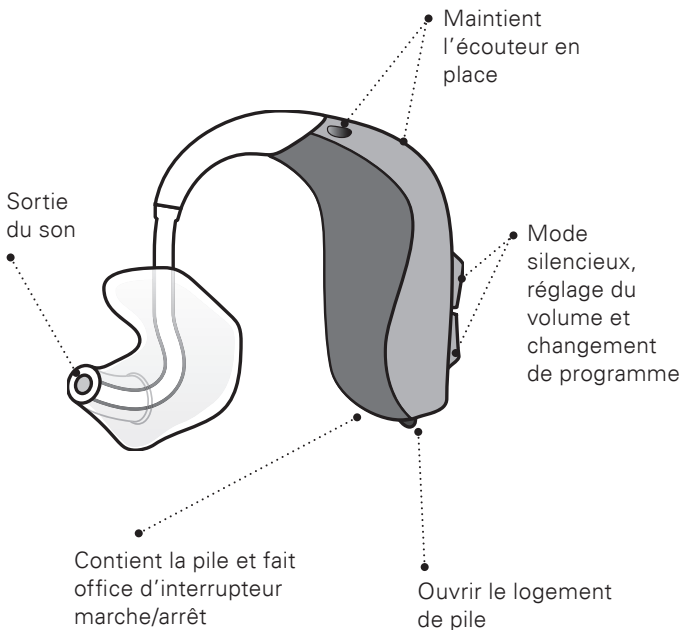

Votre aide auditive avec tube fin miniFit

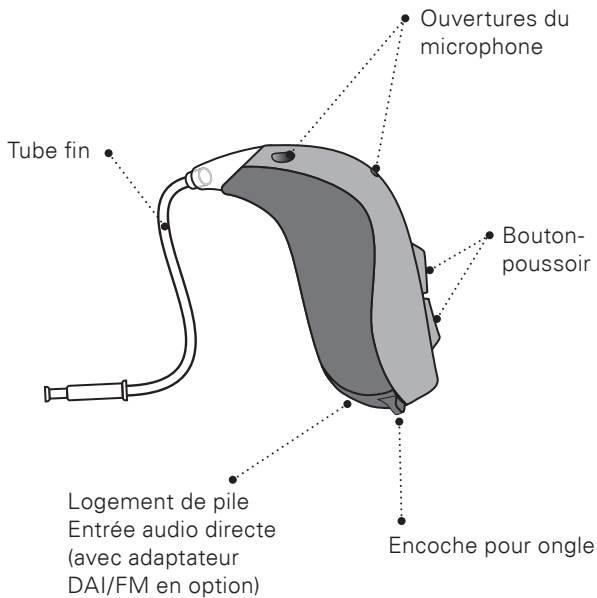


Son rôle

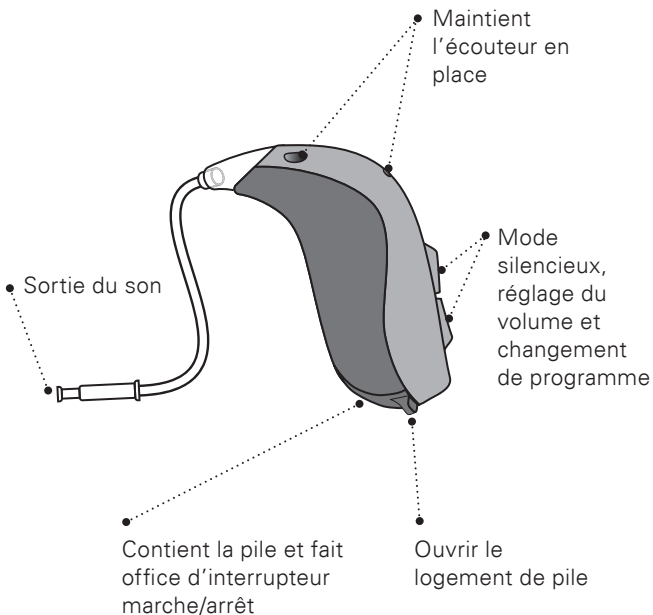

Identifier l'aide auditive gauche et droite

Il est important de faire la différence entre l'aide auditive gauche et droite car elles sont parfois programmées différemment. Vous remarquerez des indicateurs gauche/droite colorés à l'intérieur du logement de pile. Les indicateurs peuvent également se trouver sur les embouts.

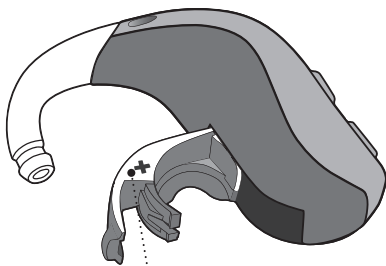


- Un indicateur **ROUGE** marque l'aide auditive DROITE

Un indicateur **BLEU** marque l'aide auditive GAUCHE

Pile (type 13)

Votre aide auditive est un appareil électronique miniature qui utilise des piles spéciales. Pour allumer l'aide auditive, vous devez insérer une nouvelle pile dans le logement de pile. La section « Remplacer la pile » vous explique comment le faire.

Vérifiez que le plus
est visible

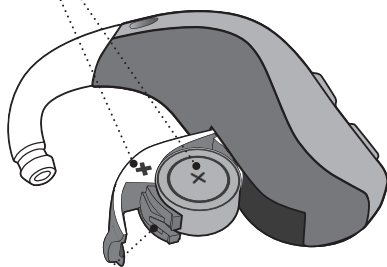

Tirez pour l'ouvrir


Logement
de pile

Allumer et éteindre l'aide auditive

Le logement de pile est utilisé pour allumer et éteindre l'aide auditive. Pour économiser la pile, n'oubliez pas d'arrêter votre aide auditive quand vous ne la portez pas.

Mettre en route

Fermer complètement le logement de pile avec la pile en place

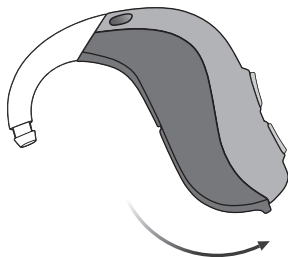

Arrêter

Ouvrir le logement de pile



Quand remplacer une pile

Quand le moment est venu de remplacer une pile, vous entendez trois bips répétés à intervalles modérés jusqu'à ce que la pile soit vide.



Trois bips*

= La pile est faible



Quatre bips

= La pile est vide

Conseil pour les piles

Pour être sûr(e) de toujours avoir une aide auditive qui fonctionne, ayez toujours sur vous une pile de rechange ou remplacez-la avant de partir de chez vous.

* Le Bluetooth® s'arrêtera de fonctionner et vous ne pourrez plus utiliser les accessoires sans fil.

Le mot, la marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Demant A/S se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.




Les piles doivent être remplacées plus souvent si vous faites du streaming audio ou écoutez de la musique sur votre aide auditive.

Remplacer la pile

1. Retirer

Ouvrez entièrement le logement de pile. Retirez la pile.

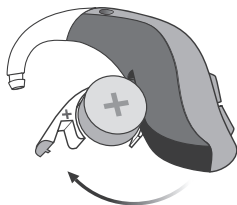

2. Prendre une nouvelle pile

Retirez l'étiquette autocollante du côté + de la pile.




Conseil :

Attendez 2 minutes pour que la pile puisse aspirer de l'air, ce qui lui permettra de fonctionner de manière optimale.


3. Insérer

Insérez la pile neuve dans le logement de pile. Vérifiez que le côté + est vers le haut.

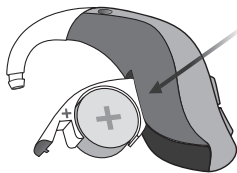


4. Fermez

Fermez le logement de pile. L'aide auditive joue un jingle dans l'embout. Tenez l'embout près de votre oreille pour entendre le jingle.

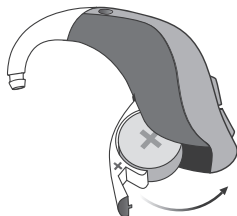

Conseil

Vous pouvez utiliser l'outil Multi Usages pour changer les piles. Utilisez l'embout magnétique pour retirer et insérer les piles. L'outil Multi Usages vous sera fourni par votre audioprothésiste.

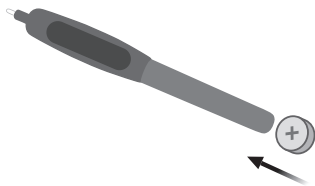

Mettre l'aide auditive avec coude

Lisez les pages suivantes si vous avez une aide auditive avec coude et embout.

L'embout est personnalisé et correspond exactement à la forme de votre oreille. Les embouts sont spécifiques à l'oreille gauche ou droite.

Étape 1

Tirez doucement votre oreille vers l'extérieur et enfoncez l'embout dans la direction du conduit auditif en le faisant légèrement pivoter.




Étape 2

Placez l'aide auditive derrière l'oreille.



Outil Multi Usages pour manipuler les piles et pour le nettoyage

L'outil Multi Usages contient un aimant qui facilite le remplacement de la pile dans l'aide auditive. Il contient également une brosse et une boucle en fil métallique pour nettoyer et enlever le cérumen de votre écouteur ou de votre embout. Si vous avez besoin d'un outil Multi Usages, adressez-vous à votre audioprothésiste.

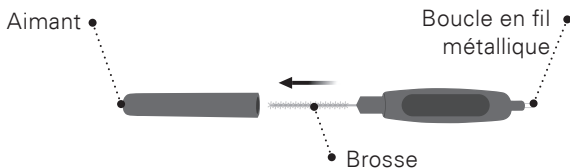

Remarque importante


Votre outil Multi Usages est doté d'un aimant intégré. Maintenez-le à une distance de 30 centimètres (1 pied) au minimum de vos cartes de crédit et autres objets sensibles aux champs magnétiques.

Entretien de votre aide auditive

Quand vous manipulez l'aide auditive, faites-le au-dessus d'une surface douce, pour éviter qu'elle s'endommage au cas où elle tomberait.

Nettoyage des microphones

Éliminez délicatement les débris des ouvertures des microphones au moyen d'une brosse propre. Brossez doucement la surface et n'enfoncez pas la brosse dans les ouvertures.

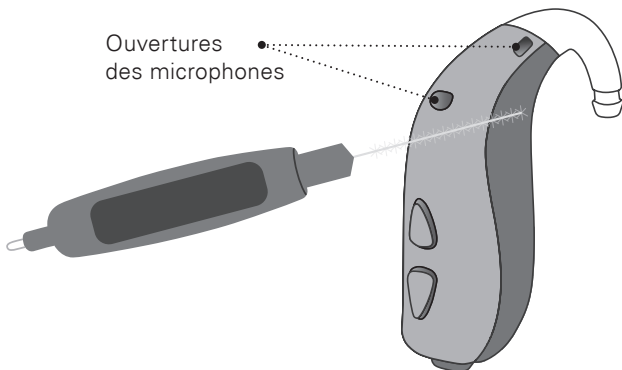


Remarque importante

Pour nettoyer les aides auditives, utilisez un chiffon doux et sec. Les aides auditives ne doivent jamais être lavées ni immergées dans l'eau ni aucun autre liquide.

Nettoyage de l'embout

L'embout doit être nettoyé régulièrement. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface de l'embout. Utilisez la boucle en fil métallique de l'outil Multi Usages pour nettoyer l'ouverture.

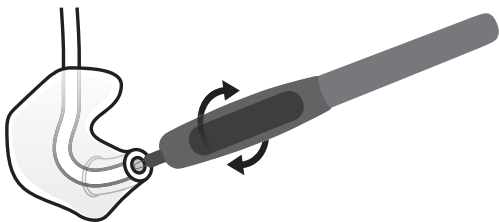

Remplacement du tube

Le tube entre l'embout et l'aide auditive doit être remplacé quand il jaunit ou durcit. Consultez votre audioprothésiste si le tube doit être remplacé.

Lavage de l'embout


Étape 1

Vérifiez que vous pouvez identifier l'embout qui correspond à chaque aide auditive avant de les déconnecter;




Étape 2

Déconnectez le tube et l'embout du coude. Tenez fermement le coude pendant que vous enlevez le tube. Sinon vous risquez d'endommager l'aide auditive.

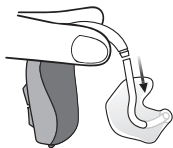

Étape 3


Lavez l'embout et le tube avec un savon doux; Rincez et séchez complètement avant de le reconnecter à l'aide auditive.

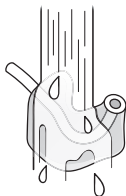

Tube fin miniFit

Lisez les pages suivantes si votre aide auditive a un tube fin miniFit et un dôme, un Grip Tip ou un Micro Mold comme embout.


miniFit est un tube fin qui amène le son dans l'oreille. Le tube fin doit toujours être utilisé avec un embout correctement inséré. Utilisez uniquement des pièces conçues pour votre aide auditive.

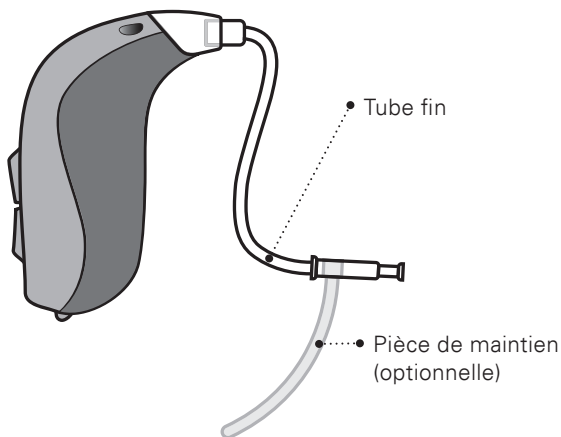

Mettre l'aide auditive avec tube fin


Étape 1

Placez l'aide auditive derrière l'oreille.

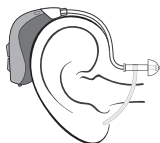

Étape 2

Saisissez le coude du tube entre le pouce et l'index. L'embout doit être dirigé vers l'ouverture du conduit auditif.

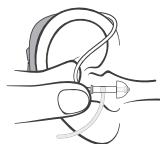

Étape 3

Poussez délicatement l'embout dans le conduit auditif jusqu'à ce que le tube fin soit plaqué contre la tempe. Si le tube fin comporte une pièce de maintien, placez-la dans l'oreille pour qu'elle suive le contour de l'oreille.




Nettoyage du tube fin

Le tube fin doit être nettoyé pour éliminer l'humidité et le cérumen. S'il n'est pas nettoyé, le cérumen peut l'obstruer et ne pourra pas transporter le son.


Étape 1

Sortez le tube fin de l'aide auditive.

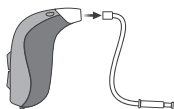


Étape 2

Enfoncez l'outil de nettoyage jusqu'au bout du tube fin.

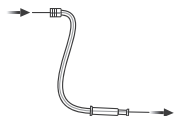

Étape 3

Reconnectez le tube fin de l'aide auditive.

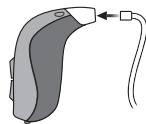

Embouts standard pour tube fin

Il existe 3 types de dômes différents. Les dômes et les Grip Tip sont en caoutchouc souple. Identifiez le type de votre embout et sa taille ci-dessous.



Dôme ouvert



Dôme Power



Dôme fermé, simple événement



Dôme fermé, double événement



Grip Tip (disponible en petit et grand, gauche et droit, avec ou sans événement)



6 mm



8 mm



10 mm



12 mm*


* pas pour dôme ouvert

Remplacer le dôme ou Grip Tip

L'embout (dôme ou Grip Tip) ne doit pas être nettoyé. Si l'embout est rempli de cérumen, remplacez-le par un neuf. Le Grip Tip doit être remplacé au moins une fois par mois.


Étape 1

Maintenez l'extrémité du tube fin et tirez sur l'embout pour le détacher.

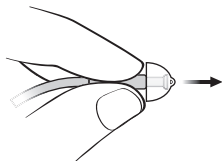


Étape 2

Insérez le tube fin exactement au centre de l'embout pour pouvoir le fixer solidement.

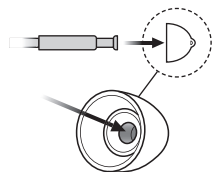

Étape 3

Appuyez fermement pour bien fixer l'embout.

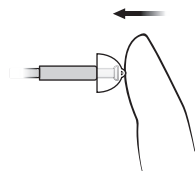


Remarque importante

Si l'embout n'est pas sur le tube quand ce dernier est retiré de l'oreille, il est possible qu'il soit resté dans le conduit auditif. Pour obtenir des instructions supplémentaires, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Embouts personnalisés pour tube fin

Les Micro Molds sont disponibles en deux matières différentes. Ces embouts sont adaptés à la forme spécifique de votre oreille.

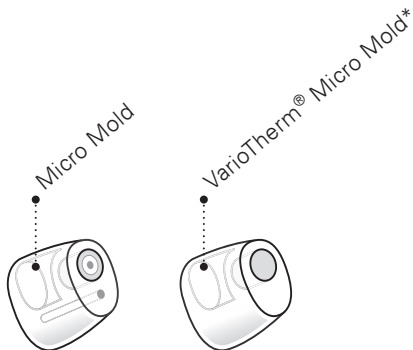


Les embouts personnalisés ont un filtre anti-cérumen blanc fixé sur la sortie du son. ProWax est le type de filtre à utiliser pour ces embouts. Pour remplacer le filtre ProWax, consultez la section « Remplacement du filtre ProWax ».

* VarioTherm® Micro Mold n'a pas de filtre anti-cérumen.

Nettoyage du Micro Mold

Le Micro Mold doit être nettoyé régulièrement.

Le Micro Mold contient un filtre à cérumen blanc qui doit être remplacé quand il est obstrué ou quand le son de l'aide auditive devient anormal.

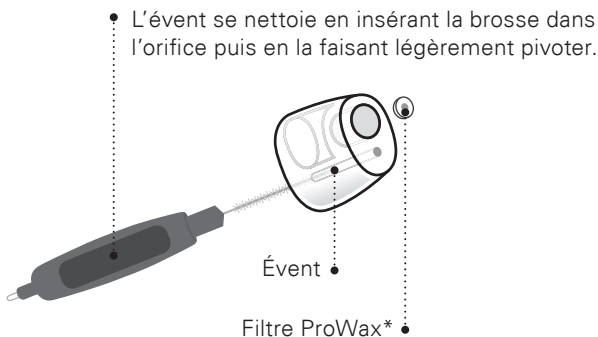

* VarioTherm® Micro Mold et Lite Tip n'ont pas de filtre anti-cérumen.


Remarque importante

Veillez à toujours utiliser le même type de filtre anti-cérumen que celui qui a été initialement fourni avec les aides auditives. Si vous avez des doutes à propos de l'utilisation ou du remplacement des filtres anti-cérumen, adressez-vous à votre audioprothésiste.

Remplacer le filtre ProWax


1. Outil

Retirez l'outil de la coque.
L'outil comporte deux tiges.
L'une est vide pour effectuer
le retrait et l'autre comporte le
filtre anti-cérumen neuf.

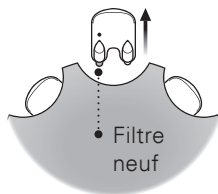


2. Retirer

Enfoncez la tige vide dans
le filtre anti-cérumen situé
sur l'embout et tirez pour
l'extraire.

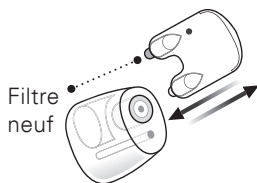


3. Insérer

Insérez le filtre anti-cérumen
neuf avec l'autre tige, retirez
l'outil et jetez-le.

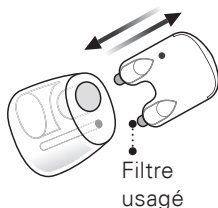

Mode avion

Quand vous montez à bord d'un avion ou entrez dans une zone où il est interdit d'émettre des signaux radio, vous devez activer le mode avion. Votre aide auditive continuera à fonctionner. Vous devez seulement activer le mode avion sur une aide auditive.

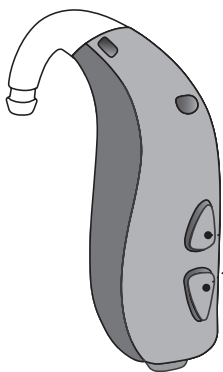

- **Pour activer et désactiver le mode avion**

Appuyez sur l'une des extrémités du bouton-poussoir pendant au moins 7 secondes. Un jingle confirme votre action.

L'ouverture et la fermeture du logement de pile désactive le mode avion. Voir la section « Réinitialisation rapide ».



Fonctions et accessoires optionnels

Les fonctions et accessoires décrits aux pages suivantes sont optionnels. Nous vous invitons à consulter votre audioprothésiste pour savoir comment votre aide auditive est programmée. Si vous vous trouvez dans des situations d'écoute difficiles, un programme spécial pourrait vous être utile. Ces programmes spéciaux sont configurés par votre audioprothésiste.

Notez les situations d'écoute durant lesquelles vous pourriez avoir besoin d'aide.

Changer le volume (optionnel)

Le bouton-poussoir vous permet de régler le volume. Vous entendez un bip quand vous montez ou baissez le volume.

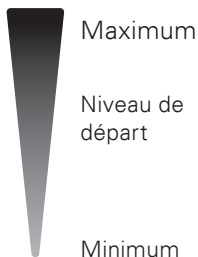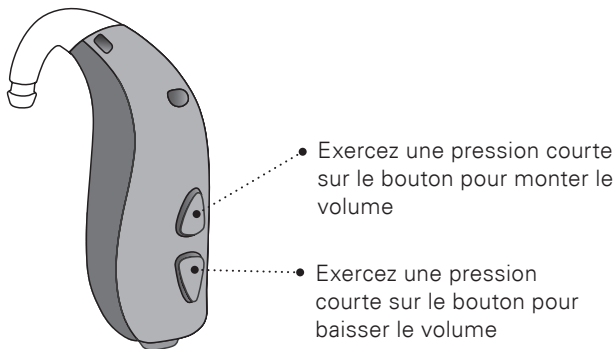

Vous entendez 2 bips au niveau de départ.
Vous entendez 3 bips au maximum et au minimum.

Changement de volume


Gauche

Droite

À remplir par votre audioprothésiste.

□ Changer le programme (optionnel)



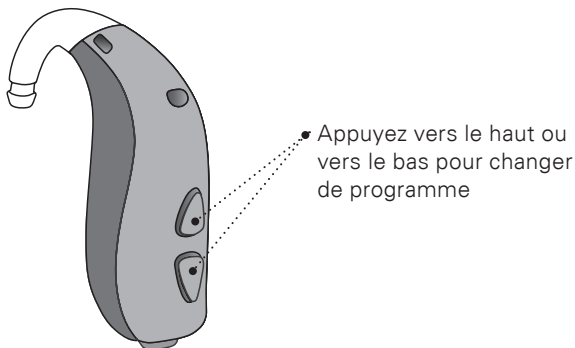

Votre aide auditive peut avoir jusqu'à 4 programmes différents qui sont paramétrés par votre audioprothésiste.



*

Vous pouvez changer de manière continue entre les programmes, vers le haut et vers le bas, en suivant l'ordre des programmes. Par exemple, si vous voulez passer du programme 1 au programme 4, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton « bas » au lieu d'appuyer trois fois sur le bouton « haut ».

À remplir par votre audioprothésiste


Programme	Son d'activation	Quand l'utiliser
1	 « 1 bip »	
2	 « 2 bips »	
3	 « 3 bips »	
4	 « 4 bips »	

Changement de programme :

<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Pression courte	<input type="checkbox"/> Pression moyenne
---------------------------------	---------------------------------	--	---

□ Mettre l'aide auditive en mode silencieux (optionnel)

Utilisez le mode silencieux si vous devez mettre l'aide auditive en silencieux pendant que vous la portez.

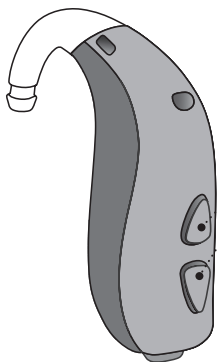

Exercez une pression très longue (4 secondes) sur l'une des extrémités du bouton pour mettre l'aide auditive en mode silencieux.

Pour la réactiver, appuyez brièvement sur le bouton.

Votre aide auditive peut être mise en mode silencieux à l'aide de l'un des appareils en option, suivants :

- Appli Bernafon App de Bernafon
- SoundClip-A
- Télécommande RC-A

Remarque importante


N'utilisez pas le mode silencieux pour éteindre vos aides auditives car, dans ce cas, elles continuent à consommer de l'énergie.

Réinitialisation rapide et mode appairage


Si vous souhaitez revenir aux paramètres standards de l'aide auditive, programmés par votre audioprothésiste, ouvrez puis fermez le logement de pile. Un jingle est diffusé quand vous réinitialisez l'aide auditive.

Pour appairer votre aide auditive avec un accessoire sans fil, votre aide auditive doit être mise en mode appairage. Pour ce faire, ouvrez et fermez le logement de pile. L'aide auditive reste en mode appairage pendant 180 secondes. Tous les accessoires compatibles sont répertoriés dans le chapitre « Accessoires sans fil ».

Ouvrez

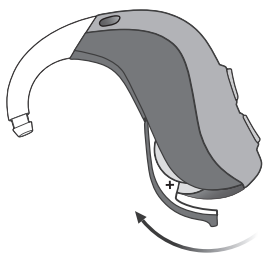

Fermez

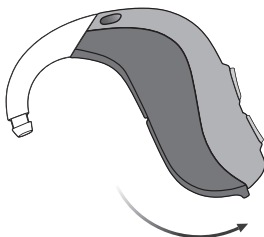

Utiliser l'aide auditive avec un iPhone, iPad et iPod touch

Votre aide auditive est un appareil Made for iPhone® et vous permet d'avoir une communication et un contrôle directs avec un iPhone®, iPad® ou iPod® touch.

Si vous avez besoin d'aide pour appairer et utiliser ces produits avec votre aide auditive, contactez votre audioprothésiste ou consultez notre site internet : www.bernafon.com/library.


Pour plus d'informations sur la compatibilité, veuillez consulter le site www.bernafon.com/products/accessories.



La diffusion audio directe n'est pas prise en charge par Android™ à l'heure actuelle.


Appairer l'aide auditive et l'iPhone

1. Paramètres

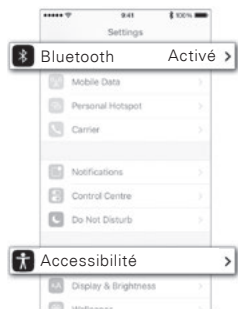


Ouvrez votre iPhone et allez dans le menu, puis sélectionnez « Paramètres ». Assurez-vous que le Bluetooth® est activé. Choisissez ensuite « Accessibilité ».

2. Accessibilité

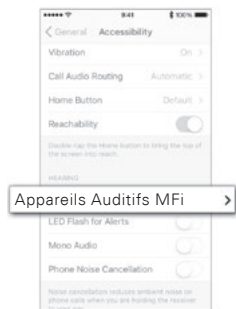


Sur l'écran « Accessibilité », choisissez « Appareils Auditifs MFi ».

3. Préparez

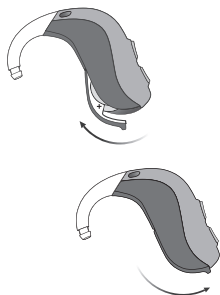

Ouvrez et fermez le logement de pile des deux aides auditives si vous en avez plus d'une et posez-les près de votre iPhone. L'aide auditive reste en mode appairage pendant 3 minutes.

4. Sélectionnez

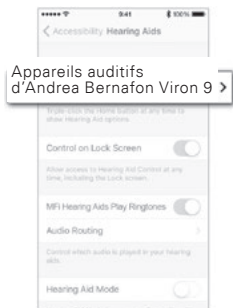

Votre iPhone détecte l'aide auditive pour l'appairage. Les appareils détectés apparaissent dans votre liste iPhone. Choisissez votre aide auditive.

5. Confirmez l'appairage



Demande d'appairage
Bluetooth
Bernafon Viron aimerait
s'appairer avec votre
iPhone

Annuler Appairer

Confirmez l'appairage.
Si vous avez deux
aides auditives,
une confirmation
d'appairage est
nécessaire pour
chaque aide auditive.

Reconnecter vos aides auditives à votre iPhone, iPad ou iPod touch

Quand vous arrêtez vos aides auditives ou votre iPhone, iPad, ou iPod touch, la connexion est coupée. Pour les reconnecter, allumez vos aides auditives en ouvrant et fermant le logement de pile. Les aides auditives se reconnectent automatiquement à votre appareil.

L'utilisation du badge Made for Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour être connecté spécifiquement au(x) produit(s) Apple identifié(s) dans le badge, et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité avec les normes législatives ou de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet appareil avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter ses performances de connexion sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Accessoires sans fil (optionnels)

Une gamme d'accessoires sans fil est disponible pour encore améliorer les possibilités de votre aide auditive sans fil. Ces accessoires peuvent vous permettre d'entendre et de communiquer encore mieux dans de nombreuses situations quotidiennes.

SoundClip-A

Cet appareil, associé à votre téléphone portable, permet d'utiliser les aides auditives comme des écouteurs stéréo. SoundClip-A peut aussi fonctionner comme un microphone de commande à distance et une télécommande.

TV-A

L'adaptateur TV-A est un émetteur sans fil du son provenant des téléviseurs et appareils audio électroniques. Le TV-A diffuse directement le son à votre aide auditive.

RC-A

La télécommande RC-A vous donne la possibilité de changer les programmes, de régler le volume ou de mettre votre aide auditive en mode silencieux.

Appli Bernafon Bernafon App

Une application qui vous permet de contrôler votre aide auditive depuis votre téléphone portable ou votre tablette. Pour iPhone, iPad, iPod touch, et appareils Android. Veillez à ne télécharger et à n'installer l'appli Bernafon App de Bernafon qu'à partir des magasins d'applications officiels.

Pour obtenir plus d'informations, contactez votre audioprothésiste ou rendez-vous sur :
www.bernafon.com/products/accessories.

Autres options (optionnel)

Bobine téléphonique

La bobine téléphonique vous aide à mieux entendre quand vous utilisez un téléphone avec boucle magnétique intégrée ou quand vous vous trouvez dans des endroits équipés de systèmes de boucle magnétique comme les théâtres, les églises ou les salles de conférences. Ce symbole, ou un signe similaire, est affiché dans tous les lieux où une boucle a été installée.



Autophone

Autophone peut activer automatiquement un programme téléphone dans l'aide auditive, si votre téléphone est doté d'un aimant dédié. L'aimant doit être positionné sur votre téléphone, à côté de la sortie sonore.



Adaptateur Direct Audio Input (DAI)

Permet à votre aide auditive de recevoir des signaux directement depuis des sources externes telles que les téléviseurs, les chaînes hi-fi, etc.

Adaptateur FM

Permet à votre aide auditive de se connecter à un récepteur FM externe.

Pour obtenir plus d'informations, contactez votre audioprothésiste.

Remarque importante

Quand l'adaptateur DAI est connecté à une source audio branchée au secteur, cette source audio doit être conforme aux normes CEI 62368-1 ou équivalentes.

Logement de pile de sécurité (en option)


Pour tenir la pile hors de portée des bébés, des jeunes enfants et des personnes ayant des difficultés d'apprentissage, il faut utiliser un logement de pile de sécurité.

Remarque importante

Évitez de forcer excessivement pour ouvrir le logement de pile lorsqu'il est en position verrouillée. Ne forcez pas le logement de pile au-delà de sa position entièrement ouverte. Assurez-vous d'insérer correctement les piles. Contactez votre audioprothésiste si vous estimez que la fonction d'inviolabilité et la capacité de verrouillage du logement de pile sont réduites.


Verrouiller le logement de pile

Fermez complètement le logement de pile et vérifiez qu'il est verrouillé.

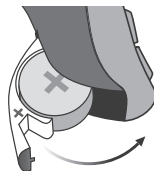

Outil pour déverrouiller le logement de pile


Utilisez ce petit outil qui vous a été fourni par votre audioprothésiste.

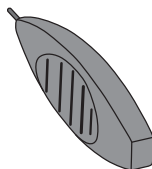

Déverrouiller le logement de pile

Insérez l'embout de l'outil dans le petit orifice à l'arrière du logement de pile.

1. Déplacez-le vers la droite et maintenez-le.
2. Ouvrir le logement de pile

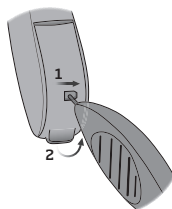

Tinnitus SoundSupport (optionnel)

Utilisation prévue de Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport est un outil destiné à générer des sons qui apportent un soulagement temporaire aux patients souffrant d'acouphènes, dans le cadre d'un programme de gestion des acouphènes.

La population cible est la population adulte (plus de 18 ans).

Tinnitus SoundSupport est destiné aux audioprothésistes agréés (audiologistes, spécialistes des aides auditives ou otorhinolaryngologistes) qui connaissent l'évaluation et le traitement des acouphènes et des pertes d'audition. L'adaptation de Tinnitus SoundSupport doit être faite par un audioprothésiste participant à un programme de gestion des acouphènes.

Directives destinées aux utilisateurs de Tinnitus SoundSupport

Ces instructions contiennent des informations à propos de Tinnitus SoundSupport, une fonctionnalité qui a peut-être été activée dans vos aides auditives par votre audioprothésiste.

Tinnitus SoundSupport est un dispositif de gestion des acouphènes qui génère des sons d'une intensité et bande passante suffisantes pour vous aider à supporter les acouphènes.

Votre audioprothésiste pourra aussi vous proposer des soins de suivi adaptés. Vous devez absolument respecter ses conseils et instructions concernant ces soins.

Uniquement sur ordonnance

Les bonnes pratiques en matière de santé exigent qu'une personne qui signale des acouphènes, ait été évaluée par un médecin diplômé spécialisé dans l'audition, avant d'utiliser un générateur de sons. Le but de cette évaluation est de s'assurer qu'une affection médicalement traitable pouvant être à l'origine des acouphènes, soit identifiée et traitée avant d'utiliser un générateur de sons.

Options de son et réglage du volume

Tinnitus SoundSupport est programmé par votre audioprothésiste en fonction de votre perte d'audition et de vos préférences en matière de soulagement des acouphènes. Il offre plusieurs options de sons différents. Votre audioprothésiste vous aidera à choisir les sons que vous préférez.

Programmes Tinnitus SoundSupport

Votre audioprothésiste vous aidera à décider quels sont les programmes pour lesquels vous souhaitez que Tinnitus SoundSupport soit activé. Le générateur de sons peut être activé dans quatre programmes maximum.

Mode silencieux

Si vous êtes dans un programme pour lequel Tinnitus SoundSupport est activé, le mode silencieux coupe seulement les sons environnementaux et pas les sons générés par Tinnitus SoundSupport. Consultez le chapitre : « Mettre l'aide auditive en mode silencieux ».

Réglage du volume avec Tinnitus SoundSupport

Quand vous sélectionnez un programme pour aide auditive pour lequel Tinnitus SoundSupport est activé, votre audioprothésiste peut uniquement régler le bouton-poussoir de votre aide auditive pour qu'il fonctionne comme contrôle du volume du son de soulagement des acouphènes.

Votre audioprothésiste règle le contrôle du volume du générateur de sons d'une de ces deux manières :

A) changement du volume dans chaque oreille séparément, ou

B) changement du volume dans les deux oreilles simultanément.

A) Comment changer le volume de Tinnitus SoundSupport dans chaque oreille séparément

Pour monter le volume (sur une seule aide auditive), appliquez une pression courte sur la partie supérieure du bouton-poussoir à plusieurs reprises jusqu'à ce que le niveau souhaité soit atteint. Pour baisser le volume (sur une seule aide auditive), appliquez une pression courte sur la partie inférieure du bouton-poussoir à plusieurs reprises jusqu'à ce que le niveau souhaité soit atteint.

B) Comment changer le volume de Tinnitus SoundSupport dans les deux oreilles simultanément

Vous pouvez utiliser une aide auditive pour augmenter/diminuer le son dans les deux aides auditives. Quand vous modifiez le volume d'une aide auditive, le volume de l'autre sera modifié de la même manière. Pour monter le volume, exercez plusieurs pressions courtes sur la partie supérieure du bouton-poussoir. Pour baisser le volume, exercez plusieurs pressions courtes sur la partie inférieure du bouton-poussoir.

À remplir par votre audioprothésiste.

Limite de durée d'utilisation

Utilisation quotidienne

Les niveaux de volume de Tinnitus SoundSupport peuvent être réglés à un niveau qui pourrait endommager définitivement l'audition s'ils étaient utilisés pendant une période prolongée. Votre audioprothésiste vous indiquera pendant combien de temps vous pouvez utiliser Tinnitus SoundSupport chaque jour. Vous ne devez jamais l'utiliser à un niveau inconfortable.

Consultez le tableau « Tinnitus SoundSupport : Restriction d'utilisation » « Paramètres de votre aide auditive personnelle » à la fin de ce manuel pour savoir pendant combien d'heures par jour vous pouvez utiliser sans danger le son de soulagement des acouphènes dans vos aides auditives.

Informations importantes destinées aux audioprothésistes à propos de Tinnitus SoundSupport

Description de l'appareil

Tinnitus SoundSupport est un module pouvant être activé dans les aides auditives par l'audioprothésiste.

Durée d'utilisation

La durée d'utilisation de Tinnitus SoundSupport diminue quand le niveau est augmenté au-dessus de 80 dB(A) SPL. Le logiciel d'adaptation affiche automatiquement un avertissement quand l'aide auditive dépasse 80 dB(A) SPL. Consultez « l'indicateur de temps maximal d'utilisation » à côté du graphique d'adaptation des acouphènes dans le logiciel d'adaptation.

Le contrôle du volume est désactivé

Par défaut, le contrôle du volume du générateur de son est désactivé dans l'aide auditive. Le risque d'exposition au bruit augmente quand le contrôle du volume est activé.

Si le contrôle du volume est activé

Un avertissement peut s'afficher si vous activez le contrôle du volume acouphènes sur l'écran « Boutons & Indicateurs ». Ceci se produit si le son d'apaisement peut être écouté à des niveaux risquant d'endommager l'audition. Le tableau de « temps maximal d'utilisation » du logiciel d'adaptation affiche le nombre d'heures pendant lesquelles le patient peut utiliser Tinnitus SoundSupport, en toute sécurité.

- Notez la durée d'utilisation maximale pour chaque programme pour lequel Tinnitus SoundSupport est activé.
- Notez ces valeurs dans le tableau : « Tinnitus SoundSupport : Restriction d'utilisation », à la fin de ce manuel.
- Donnez des instructions en conséquence à votre patient.

⚠ Avertissements liés à Tinnitus SoundSupport

Si votre audioprothésiste a activé le générateur de sons Tinnitus SoundSupport, lisez attentivement les avertissements suivants.

Il existe des préoccupations potentielles associées à l'utilisation de tout son généré par un dispositif de gestion des acouphènes. Parmi celles-ci, citons l'aggravation potentielle des acouphènes et/ou une évolution potentielle des seuils d'audition.

Si vous rencontrez ou remarquez une évolution de l'audition ou des acouphènes, ou des vertiges, nausées, maux de tête, palpitations cardiaques ou irritations cutanées au point de contact avec l'appareil, vous devez immédiatement interrompre l'utilisation de l'appareil et consulter un médecin ou votre audioprothésiste.

Comme avec tout appareil, une utilisation abusive de la fonction de génération de son peut avoir des effets nocifs potentiels. Des précautions doivent être prises pour éviter toute utilisation non autorisée et pour tenir l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.

Durée d'utilisation

Respectez toujours la durée d'utilisation maximale quotidienne de Tinnitus SoundSupport conseillée par votre audioprothésiste. Une utilisation prolongée peut entraîner l'aggravation de vos acouphènes ou de votre perte d'audition.

⚠ Avertissements généraux

Vous devez vous familiariser pleinement avec les avertissements généraux suivants avant d'utiliser vos aides auditives pour assurer votre sécurité personnelle et garantir une utilisation correcte. Consultez votre audioprothésiste si vos aides auditives fonctionnent de manière inattendue ou si des incidents sérieux se produisent durant leur utilisation ou à cause de leur utilisation. Votre audioprothésiste vous aidera à résoudre les problèmes liés à la manipulation et, le cas échéant, à effectuer un signalement auprès du fabricant et/ou des autorités nationales. Veuillez noter que les aides auditives ne restaurent pas l'audition normale et ne peuvent ni empêcher ni améliorer une perte d'audition liée à une déficience auditive. Les aides auditives ne constituent qu'un paramètre de la réhabilitation auditive et peuvent devoir être complétées par un entraînement auditif et un apprentissage de la lecture labiale. Notez également que dans la plupart des cas l'utilisation occasionnelle d'une aide auditive ne permet pas à un utilisateur d'en retirer tous les avantages.

Utilisation des aides auditives

- Les aides auditives doivent uniquement être utilisées conformément au mode d'emploi et doivent être réglées par votre audioprothésiste, une mauvaise utilisation peut entraîner une perte auditive soudaine et permanente.
- Ne laissez pas d'autres personnes porter votre aide auditive car une utilisation incorrecte pourrait entraîner une perte auditive permanente pour ces personnes.

Risque d'étouffement et risque d'ingestion des piles ou d'autres petites pièces

- Les aides auditives, leurs pièces et les piles doivent être tenues hors de portée des enfants et de toute personne susceptible de les avaler ou de se blesser.
- Les piles peuvent parfois être confondues avec des comprimés. Vous devez donc examiner soigneusement vos médicaments avant d'avaler vos comprimés.
- La plupart des aides auditives peuvent être fournies avec un logement de pile de sécurité sur demande. Ceci est vivement recommandé pour les jeunes enfants et les personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement.

En cas d'ingestion d'une pile, d'une aide auditive ou d'une petite pièce, consultez immédiatement un médecin.

Utilisation des piles

- Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Des piles de mauvaise qualité peuvent fuir et provoquer des dommages corporels.
- Ne tentez jamais de recharger vos piles et ne les incinérez pas. Elles pourraient exploser.

⚠ Avertissements généraux

Dysfonctionnement

- Vos aides auditives peuvent s'arrêter de fonctionner sans avertissement. Veuillez garder ceci présent à l'esprit lorsque vous dépendez de quelque manière de sons d'avertissement (par exemple dans le trafic). Les aides auditives peuvent cesser de fonctionner, par exemple si les piles sont vides ou si les tubes sont obstrués par de l'humidité ou du cérumen.

Implants actifs

- L'aide auditive a fait l'objet de tests approfondis et a été approuvée pour la santé humaine conformément aux normes internationales relatives à l'exposition humaine (Débit d'absorption spécifique - DAS), le courant électromagnétique induit et les tensions induites dans le corps humain.
- Les valeurs d'exposition sont bien inférieures aux limites de sécurité acceptées internationalement pour le DAS, le courant électromagnétique induit et les tensions induites dans le corps humain définies dans les normes pour la santé humaine et la coexistence avec des implants médicaux actifs comme les stimulateurs cardiaques et défibrillateurs cardiaques.
- L'aimant Autophone ou votre outil Multi Usages (qui contient un aimant) doivent être tenus à plus de 30 centimètres (1 pied) de l'implant. Ne les transportez pas dans votre poche de poitrine, par exemple.

- Respectez les directives des fabricants de défibrillateurs et de stimulateurs cardiaques implantables concernant leur utilisation avec les aimants.
- Si vous avez un implant cérébral actif, contactez le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations quant aux risques de perturbation.

Examens radiologiques (rayons X), tomodensitométrie (« scanners »), IRM, TEP, électrothérapie et interventions chirurgicales

- Retirez votre aide auditive avant une radiographie, un examen d'imagerie par TDM, IRM ou PET, une électrothérapie ou une intervention chirurgicale car votre aide auditive pourrait être endommagée par une exposition à des champs électromagnétiques puissants.

Chaleur et produits chimiques

- L'aide auditive ne doit jamais être exposée à des températures extrêmes, par exemple dans une voiture garée au soleil.
- L'aide auditive ne doit pas être séchée dans un four à micro-ondes ou tout autre type de four.
- Les produits chimiques se trouvant dans les produits cosmétiques, la laque de coiffure, le parfum, la lotion après-rasage, les produits solaires et les insecticides peuvent endommager l'aide auditive. Retirez toujours votre aide auditive avant d'appliquer ces produits et laissez-les sécher avant de l'utiliser.

Avertissements généraux

Aide auditive Power

- Des précautions spéciales doivent être prises pour choisir, adapter et utiliser des aides auditives lorsque le niveau de pression acoustique maximum dépasse 132 dB SPL (CEI 60318-4 / CEI 711), car il y a un risque d'altération de la capacité auditive restante de l'utilisateur de l'aide auditive.

Pour savoir si votre appareil est une aide auditive Power, reportez-vous à la section « Vue d'ensemble du modèle » dans ce livret.

Effets secondaires possibles

- Les aides auditives, les embouts ou dômes peuvent provoquer une accumulation accélérée de cérumen.
- Les matériaux non allergéniques utilisés dans les aides auditives peuvent, dans de rares cas, provoquer une irritation cutanée ou d'autres effets secondaires.

Veillez consulter un médecin si ces situations se produisent.

Utilisation en avion

- Vos aides auditives sont dotées de la technologie sans fil Bluetooth. À bord d'un avion, les aides auditives doivent être mises en mode avion pour désactiver le Bluetooth, à moins que le personnel de bord n'autorise le Bluetooth.

Connexion à un équipement externe

- La sécurité de l'aide auditive lorsqu'elle est connectée à un équipement externe avec un câble d'entrée auxiliaire et/ou un câble USB et/ou directement, est déterminée par la source du signal externe. Lorsque l'aide auditive est connectée à un équipement externe branché sur une prise de courant, cet équipement doit être conforme à la norme CEI 62368-1 ou à des normes de sécurité équivalentes.

Embout détaché dans le conduit auditif

Si l'embout n'est pas sur le tube quand ce dernier est retiré de l'oreille, il est possible qu'il soit resté dans le conduit auditif. Pour obtenir des instructions supplémentaires, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Modification des aides auditives non autorisée

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler la garantie de l'équipement.

Utilisation d'accessoires tiers

N'utilisez que des accessoires, des transducteurs ou des câbles fournis par le fabricant. Les accessoires qui ne sont pas d'origine peuvent réduire la compatibilité électromagnétique (CEM) de votre aide auditive.

Interférences

Les aides auditives ont subi de nombreux tests concernant les interférences, selon les normes internationales les plus strictes.



Des interférences électromagnétiques peuvent se produire à proximité des appareils présentant le symbole à droite. Les équipements de communication portables et mobiles RF (radiofréquence) peuvent affecter la performance de vos aides auditives. Si vos aides auditives sont affectées par des interférences électromagnétiques, éloignez-vous de la source pour diminuer les interférences.

Remarques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles
	Pile épuisée
Pas de son	Embouts obstrués (dôme, Grip Tip ou Micro Mold)
Son intermittent ou réduit	Sortie sonore obstruée Humidité Pile épuisée
Grincement	Embout de l'aide auditive mal inséré Accumulation de cérumen dans le conduit auditif
Bips sonores	Si votre aide auditive émet 8 bips 4 fois de suite, cela signifie que son microphone a besoin d'une révision
Problème d'appairage avec un appareil Apple	Échec de la connexion Bluetooth® Une seule aide auditive appairée

Solutions

Remplacer la pile

Nettoyez l'embout

Envisagez de remplacer le filtre anti-cérumen, le dôme ou le Grip Tip

Nettoyez l'embout ou remplacez le filtre anti-cérumen, le dôme ou le Grip Tip

Essuyez la pile avec un chiffon sec

Remplacer la pile

Réinsérez l'embout

Faites examiner votre conduit auditif par un médecin

Contactez votre audioprothésiste

1. Dissociez vos aides auditives (Paramètres → Accessibilité → Appareils auditifs MFi → Appareils → Oublier cet appareil).
 2. Désactivez le Bluetooth® et réactivez-le.
 3. Ouvrez et fermez le logement de pile des aides auditives.
 4. Appairez à nouveau les aides auditives (voir la section « Appairer les aides auditives avec un iPhone »).
-

Si aucune des solutions ci-dessus ne donne de résultat, consultez votre audioprothésiste pour lui demander conseil.

Résistance à l'eau et à la poussière (IP68)

Votre aide auditive est étanche à la poussière et protégée contre la pénétration d'eau. Cela signifie qu'elle est conçue pour être portée dans toutes les situations de la vie quotidienne. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter si vous transpirez ou si votre tête est mouillée quand il pleut. Si votre aide auditive entre en contact avec de l'eau et cesse de fonctionner, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Essuyez-la doucement à l'aide d'un chiffon pour la sécher.
2. Ouvrez le logement de pile et retirez la pile, puis essuyez doucement l'eau se trouvant dans le logement de pile.
3. Laissez sécher l'aide auditive avec le logement de pile ouvert pendant environ 30 minutes.
4. Mettez une pile neuve.

Remarque importante

Ne portez pas votre aide auditive sous la douche ou pendant des activités aquatiques. Évitez de plonger l'aide auditive dans l'eau ou d'autres liquides.

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation	Température : +1 °C à +40 °C (34°F à 104°F) Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa
--------------------------	---

Conditions de stockage et de transport	La température et l'humidité ne doivent pas dépasser les limites suivantes pendant des périodes prolongées durant le transport et le stockage :
--	---

Transport

Température: -25 °C à +60 °C (-13°F à 140°F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Stockage

Température: -25 °C à +60 °C (-13°F à 140°F)
Humidité : 5 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1 060 hPa

Certificat de garantie

Nom du propriétaire : _____

Audioprothésiste : _____

Adresse de l'audioprothésiste : _____

Numéro de téléphone de l'audioprothésiste : _____

Date d'achat : _____

Période de garantie : _____

Mois : _____

Modèle droit : _____

N° de série : _____

Modèle gauche : _____

N° de série : _____

Garantie internationale

Votre aide auditive bénéficie d'une garantie limitée internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans l'aide auditive elle-même, mais pas les accessoires tels que les piles, les tubes, les écouteurs, les embouts, les filtres, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien incorrect, une utilisation excessive, des accidents, réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des modifications physiques de l'oreille, des dégâts provoqués par la pénétration d'un corps étranger dans l'appareil ou des réglages incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. Dans le cadre de cette garantie, le fabricant choisira, à sa seule discrétion, de réparer l'aide auditive ou de la remplacer par un modèle équivalent. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui dépasse les clauses de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien

Apportez votre aide auditive à votre audioprothésiste qui pourra être capable de rectifier immédiatement les problèmes mineurs et effectuer des réglages. Votre audioprothésiste peut vous aider à obtenir un service de garantie auprès du fabricant. Votre audioprothésiste peut facturer des frais pour ses services.

Informations techniques

Les aides auditives contiennent les deux technologies radio suivantes :

Les aides auditives contiennent un émetteur-récepteur radio utilisant une technologie d'induction magnétique de courte distance à 3,84 MHz. La force du champ magnétique de l'émetteur est très basse et ne dépasse jamais 15 nW [généralement inférieure à -40 dB μ A/m à une distance de 10 mètres ($-12,20$ dB μ A/ft à une distance de 33 pieds)].

Les aides auditives contiennent aussi un émetteur-récepteur radio doté de la technologie Bluetooth Low Energy et d'une technologie radio à courte portée exclusive, fonctionnant toutes les deux sur bande ISM à 2,4 GHz. L'émetteur radio est faible et reste toujours en dessous de 3 mW, soit l'équivalent de 4,8 dBm de puissance rayonnée totale.

Utilisez vos aides auditives uniquement dans des zones où la transmission sans fil est autorisée. Les aides auditives sont conformes aux normes internationales concernant les émetteurs radio, la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine. En raison de l'espace disponible limité sur l'aide auditive, tous les marquages de certification sont présents dans ce mode d'emploi. Des informations supplémentaires sont disponibles dans la fiche d'information sur le produit sur www.bernafon.com.

États-Unis et Canada

Cet appareil contient un module radio (Aurora BTE power) portant les numéros de certification suivants :

FCC ID : 2ACAH-AUBTEP

IC : 11936A-AUBTEP

Note :

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC et aux normes RSS exemptées de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne risque pas de causer d'interférences dommageables, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Le fabricant déclare que cette aide auditive est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Cet appareil médical est conforme au Règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745. La déclaration de conformité est disponible auprès du siège social.

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Suisse
www.bernafon.com/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark

 **Bluetooth®**

IP68



Les déchets électroniques doivent être traités selon la législation locale.



Paramètres de votre aide auditive personnelle

À remplir par votre audioprothésiste

Aperçu des paramètres de votre aide auditive

Gauche		Droite
<input type="checkbox"/>	Contrôle du volume	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Changement de programme	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mode silencieux	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/>

Indicateurs de contrôle du volume

<input type="checkbox"/>	Émet un bip au volume min/max	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bip quand le volume est changé	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Émet un bip au volume préféré	<input type="checkbox"/>

Indicateurs de pile

<input type="checkbox"/>	Avertissement pile faible	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------	--------------------------


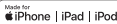








Tinnitus SoundSupport: Limite de durée d'utilisation

Pas de limite de durée d'utilisation

Programme	Volume de départ (acouphènes)	Volume maximum (acouphènes)
<input type="checkbox"/> 1	Max ____ heures par jour	Max ____ heures par jour
<input type="checkbox"/> 2	Max ____ heures par jour	Max ____ heures par jour
<input type="checkbox"/> 3	Max ____ heures par jour	Max ____ heures par jour
<input type="checkbox"/> 4	Max ____ heures par jour	Max ____ heures par jour

Description des symboles utilisés dans ce manuel ou sur l'étiquette d'emballage

	<p>Avertissements Les textes signalés par un symbole d'avertissement doivent être lus avant d'utiliser l'appareil.</p>
	<p>Fabricant L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans la directive de l'UE 2017/745.</p>
	<p>Marquage CE L'appareil est conforme à tous les règlements et directives de l'UE requis. Le numéro à quatre chiffres indique l'identification de l'organisme notifié.</p>
	<p>Déchets électroniques (DEEE) Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux réglementations locales. Les utilisateurs d'aides auditives peuvent également rapporter les déchets électroniques à leur audioprothésiste pour qu'il les mette au rebut. L'équipement électronique est couvert par la Directive 2012/19/UE sur les déchets et l'équipement électrique (DEEE).</p>
	<p>Marquage de Conformité Réglementaire (RCM) Cet appareil est conforme à la sécurité électrique, la CEM et aux exigences relatives au spectre radioélectrique pour les appareils destinés aux marchés australien ou néo-zélandais.</p>
	<p>Code IP Classe de protection contre la pénétration nuisible d'eau et de particules conformément à la norme EN 60529. IP6X indique la protection totale contre les poussières. IPX8 indique la protection contre les effets de l'immersion continue dans l'eau.</p>

 Bluetooth®	Logo Bluetooth® Marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de celle-ci requiert une licence.
	Badges Made for Apple Cet appareil est compatible avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch.
	Tenir au sec Indique un appareil médical qui doit être protégé de l'humidité.
	Référence catalogue Indique le nombre du catalogue du fabricant pour que l'appareil médical puisse être identifié.
	Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant pour qu'un appareil médical spécifique puisse être identifié.
	Boucle à induction Ce logo incorpore le symbole universel de l'assistance auditive. Le T signifie qu'une boucle à induction est installée.
	Appareil médical L'appareil est un appareil médical.
	Émetteur de radiofréquences (RF) Votre aide auditive est dotée d'un émetteur RF.
	Code article international Un code constitué de 14 chiffres, unique et international, utilisé pour identifier les appareils médicaux, y compris les logiciels pour les appareils médicaux. Dans ce manuel, le GTIN concerne le firmware (FW) de l'appareil médical. Sur l'étiquette d'emballage réglementaire, le GTIN concerne le matériel de l'appareil médical.
	Identifiant unique de dispositif Indique un support qui contient des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

< >
8,15 mm

Placeholder
for FSC logo



FSC
MIX
Paper
FSC® C043870

19 mm

9,0 mm

< 15 mm >

