

RC-A

Afstandsbediening



Gebruiksaanwijzing

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe RC-A. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe RC-A te halen.

Indien u nog verdere vragen over het gebruik van uw RC-A heeft, neem dan contact op met uw hoorzorgprofessional.

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	De RC-A is bedoeld om gebruikers van hoortoestellen met draadloze connectiviteit te helpen bij het bedienen van de functies die door hun hooroplossing worden geleverd.
Indicaties voor gebruik	Geen indicaties voor gebruik.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden
Gebruiksomgeving	Binnen / buiten.
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het apparaat. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen.
Klinische voordelen	Bekijk de klinische voordelen van het hoortoestel


Inhoudsopgave

Productoverzicht	8
Plaatsen en verwijderen van batterijen	9
Koppelen van de RC-A met uw hoortoestellen	14
Koppeling tussen de RC-A en de hoortoestellen verwijderen	20
Bedieningsafstand	22
Bevestigingen	24
Van programma wisselen	26
Volume wijzigen	28
Dempen	30

Vergrendelen/ontgrendelen van de toetsen op de RC-A	32
Bevestigingsoog	34
Onderhoud van uw RC-A	35
Waarschuwingen	36
Internationale garantie	45
Technische informatie	48

Productoverzicht

- 1 Volumeregeling omhoog
- 2 Volumeregeling omlaag
- 3 Programmatoets
- 4 Statuslampje
- 5 Batterijklep
- 6 Vingergreep
- 7 Bevestigingssoog

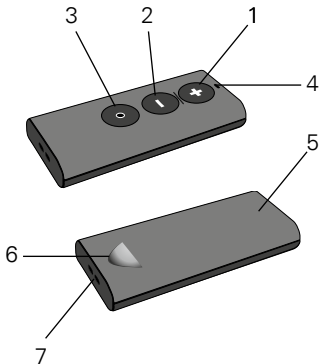




Plaatsen en verwijderen van batterijen

De RC-A gebruikt twee alkaline AAAA batterijen. Volg deze instructies voor het plaatsen van nieuwe batterijen.

De levensduur van een batterij hangt af van het gebruik. Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer eenmaal per jaar worden vervangen. Verwijder de gebruikte batterijen en gooi ze weg volgens de lokale voorschriften.


Verwijder de batterijklep

1. Duw de vingergreep met uw duim naar beneden.
2. Duw de batterijklep vanaf de andere kant met uw andere duim in de richting van de vingergreep.
3. Haal de batterijklep er helemaal af.
4. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment waarbij u ervoor moet zorgen dat het +-teken op de batterij overeenkomt met het +-teken in het batterijcompartiment.

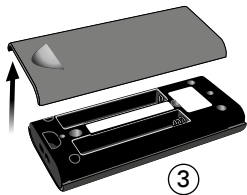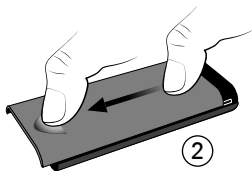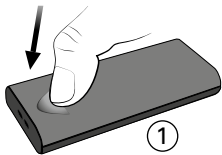

Plaats de batterijklep terug

1. Plaats de batterijklep terug op ongeveer 6 mm vanaf de bovenkant van de RC-A.
2. Schuif de batterijklep tot het klikt zoals aangegeven.

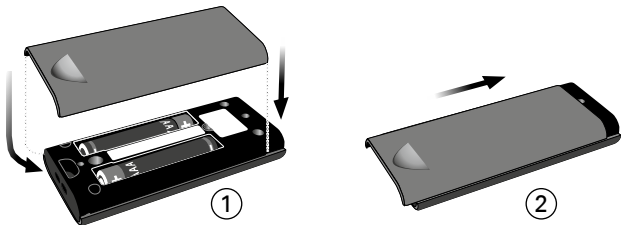

Belangrijke opmerking

Forceer de batterijklep niet. Als u kracht nodig heeft om de klep terug te plaatsen controleer dan eerst of deze wel goed zit. Plaats de batterijklep opnieuw zodat deze zonder moeite dichtgemaakt kan worden.

Koppelen van de RC-A met uw hoortoestellen

De RC-A is een persoonlijk hulpmiddel voor gebruik met één paar hoortoestellen. De RC-A kan na het koppelen maximaal twee hoortoestellen tegelijkertijd bedienen.


Voordat de RC-A met uw hoortoestellen gebruikt kan worden moeten de twee apparaten met elkaar worden verbonden.

U kunt ervoor kiezen om de RC-A met twee hoortoestellen tegelijk te koppelen of één voor één. U zult de koppelingsprocedure moeten herhalen als u ervoor kiest uw hoortoestellen één voor één te koppelen.

De volgende instructies zijn voor het koppelen van één paar hoortoestellen met de RC-A.

Afstandsbediening gereed

1. Controleer of de RC-A functionerende batterijen heeft door op een willekeurige toets te drukken. Als de batterijen werken zal het statuslampje van de RC-A gaan branden als de toets wordt ingedrukt.

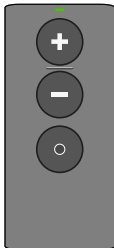

Hoortoestellen gereed


2. Start de hoortoestellen opnieuw op om de koppelstand te activeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen om te zien hoe u de hoortoestellen in- en uitschakelt.

Wacht ongeveer 10 seconden – tot de hoortoestellen volledig aan staan en het startmelodietje is afgespeeld wat aangeeft dat ze aan staan.

De hoortoestellen blijven 3 minuten in koppelstand staan.

Binnen bereik

3. Plaats beide hoortoestellen binnen bereik van de RC-A (d.w.z. binnen 20 cm).

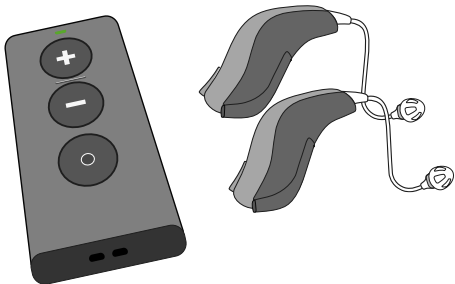

Koppeling

4. Druk op een willekeurige toets op de RC-A en deze zal automatisch koppelen met de hoortoestellen binnen bereik.




Als het statuslampje op de RC-A 10 seconden continu groen gaat branden, zijn de apparaten gekoppeld.

Koppeling tussen de RC-A en de hoortoestellen verwijderen

De RC-A kan onmiddellijk worden gekoppeld met één paar hoortoestellen. Als u de RC-A met een ander paar hoortoestellen wilt koppelen, dan moet u eerst de huidige koppeling verwijderen.

Voor het wissen van de huidige koppeling, houdt u de drie toetsen tegelijk voor 5 seconden ingedrukt.

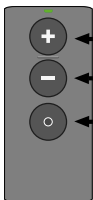

Houd ongeveer 5 seconden ingedrukt om de huidige koppeling te verwijderen


Als het statuslampje op de afstandbediening continu gaat branden voor 10 seconden, dan is de koppeling gewist.

Uw RC-A is gereed om weer met uw hoortoestellen gekoppeld te worden (zie pagina 14).

Bedieningsafstand

Voor bediening van uw hoortoestellen houdt u de RC-A op maximaal 1,8 meter (5,9 ft) afstand van de hoortoestellen. Er is geen directe zichtlijn tussen de RC-A en de hoortoestellen nodig.

Als u twee hoortoestellen met de RC-A heeft gekoppeld, dan worden beide toestellen tegelijkertijd gewijzigd.

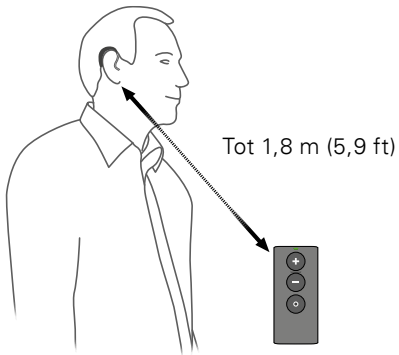

Bevestigingen

Visuele indicatie

Het statuslampje op de RC-A gaat branden als er een toets wordt ingedrukt.




Auditieve indicatie

U hoort een geluid in uw hoortoestellen ter bevestiging dat de handeling is uitgevoerd.

Batterij bijna leeg


Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het statuslampje snel wanneer er een toets wordt ingedrukt. In dat geval dient u de batterijen zo spoedig mogelijk te vervangen.

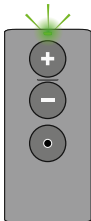

Van programma wisselen

De RC-A kan worden gebruikt voor het veranderen van programma als uw hoorzorgprofessional meer dan één programma in uw hoortoestel heeft geconfigureerd.

Druk op de programmatoets op de RC-A om door de programma's van het hoortoestel te gaan. Elke keer dat u de toets indrukt, gaan de hoortoestellen verder naar het volgende programma.

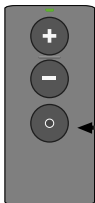

Druk om het programma te wijzigen

Belangrijke opmerking

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Volume wijzigen

U kunt de geluidsterkte van uw hoortoestel aanpassen met behulp van de volumeregelaar op de RC-A.

U hoort een korte bevestiging in uw hoortoestellen als u het volume verhoogt of verlaagt.

Om het volume van uw hoortoestellen harder te zetten, drukt u op de volume-omhoogtoets.

Om het volume van uw hoortoestellen zachter te zetten, drukt u op de volume-omlaagtoets.



Druk op "+"
om het volume
harder te zetten
(harder geluid)



Druk op "-"
om het volume
zachter te zetten
(zachter geluid)

Dempen

U kunt de 'mute'-functie gebruiken om de hoortoestellen te dempen terwijl u ze in heeft. Druk op de volume-omlaagtoets en houdt deze ongeveer 2 seconden ingedrukt tot het statuslampje uit gaat om de hoortoestellen te dempen.

Dempen opheffen

Druk kort op een willekeurige toets op de RC-A om de demping van uw hoortoestellen op te heffen.



Houdt ongeveer
2 seconden ingedrukt om
te dempen

Belangrijke opmerking


Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

Vergrendelen/ontgrendelen van de toetsen op de RC-A

Om per ongeluk indrukken van de toetsen te voorkomen als u de RC-A in uw zak heeft, kunt u ervoor kiezen om de toetsen te vergrendelen.

Vergrendelen van de toetsen op de RC-A

1. Houd de volume-omlaagtoets en de programmatoets 3–4 seconden tegelijk ingedrukt.

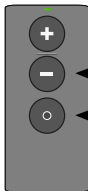

Houdt ongeveer 3–4 seconden ingedrukt om te vergrendelen

2. Het statuslampje zal twee keer knipperen als de toetsen zijn vergrendeld.

Om te controleren dat de toetsen zijn vergrendeld, drukt u op een willekeurige toets. Het statuslampje knippert drie keer ter bevestiging.


Ontgrendelen van de toetsen van de RC-A

1. Houd de volume-omlaagtoets en de programmatoets opnieuw 3–4 seconden tegelijk ingedrukt.
2. Het statuslampje zal onderbroken oplichten de toetsen zijn ontgrendeld.

Bevestigingssoog

Voor uw gemak heeft de RC-A een bevestigingssoog waaraan een dun koord kan worden vastgemaakt zodat u uw RC-A gemakkelijker kunt dragen en bij u kunt houden.

1. Verwijder de batterijklep (zie pagina 10 en 11).
2. Rijg een dun koordje door het bevestigingssoog.

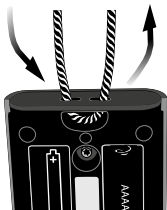

Onderhoud van uw RC-A

Als u de batterijen vervangt of de RC-A schoonmaakt, doe dat dan boven een zacht oppervlak. Zo voorkomt u beschadiging als u de RC-A laat vallen.

Belangrijke opmerking

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de RC-A. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Waarschuwingen

Voor uw persoonlijke veiligheid en voor een correct gebruik dient u zich volledig vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw RC-A gebruikt. Neem contact op met uw hoorzorgprofessional als u tijdens het gebruik of vanwege het gebruik van uw RC-A onverwachte handelingen of ernstige incidenten ervaart. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

- Uw RC-A, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van eenieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Raadpleeg direct een arts wanneer er een batterij of ander klein onderdeel is ingeslikt.

Waarschuwingen

Onbevoegd gebruik

- In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw RC-A buiten bereik van kinderen te blijven of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Koordbevestiging

- Als u een handkoordje gebruikt, zorg er dan voor dat deze geschikt is voor gebruik met de RC-A. Gebruik nooit een lanyard vanwege het risico op verstikking.

Batterijgebruik

- Gebruik altijd batterijen die worden aanbevolen door uw hoorzorgprofessional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen gaan lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer uw batterijen nooit opnieuw op te laden en verbrand de batterijen nooit. De batterijen zouden kunnen exploderen.

Actieve implantaten

- De RC-A is grondig getest en goed bevonden voor de menselijke gezondheid volgens de internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio – specifieke energieabsorptietempo [SAR]), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

Waarschuwingen

De blootstellingswaarden liggen ruim onder de internationaal geaccepteerde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten, zoals pacemakers en defibrillators.

- Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van uw implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

- Verwijder uw RC-A vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. De afstandbediening kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Mogelijke bijwerkingen

- De anti-allergene materialen in uw RC-A kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als deze bijwerkingen optreden.

Waarschuwingen

Hitte en chemicaliën

- Stel uw RC-A nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.
- Uw RC-A mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.
- De chemicaliën in cosmetica, haarspray, parfum, aftershave, zonnebrandcrème of insectenspray kunnen uw RC-A beschadigen. Verwijder daarom altijd uw RC-A voordat u deze producten aanbrengt en neem de tijd om te laten drogen, voordat u uw RC-A weer plaatst.

Gebruik in verkeer

- Het gebruik van de RC-A tijdens het autorijden kan afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de RC-A gebruikt. Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u zich in het verkeer bevindt.

Gebruik in vliegtuigen

- Uw RC-A is voorzien van Bluetooth®. De RC-A mag niet aan boord van een vliegtuig worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Waarschuwingen

Storing

- Uw RC-A is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen uw RC-A en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de RC-A en de storende apparatuur te vergroten.

Internationale garantie

Uw RC-A afstandsbediening valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden.

Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpas-

singen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional kan een garantie hebben afgegeven die verder gaat dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw RC-A kunt u het beste naar uw hoorzorgprofessional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Datum:

Model:

Garantieperiode:

Serienr.:

Hoorzorgprofessional

Technische informatie

Model	RC-3B
Gebruiksomstandigheden	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: 5 °C tot 40 °C Vochtigheid: 15 % tot 93 %, vochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Opslag- en transportomstandigheden	Temperatuur: -25 °C tot 70 °C Vochtigheid: 15 % tot 93 %, vochtigheid, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Mechanische afmetingen	75,3 x 35 x 11,8 mm; gewicht 32,7 g (incl. batterijen)
Compatibiliteit	Bernafon hoortoestellen met 2,4 GHz radiotechnologie
Type batterij	2 x AAAA
Levensduur batterij bij normaal gebruik	12 maanden
Transmissiebereik	Maximaal 1,8 m
Statusindicator	Groene LED

Ontvanger:	
Bedieningsfrequentie	2,402 GHz – 2,480 GHz (ISM-band)
Aantal kanalen	39
Zendvermogen	<10 dBm EIRP
Kanaal bandbreedte	1 MHz
Type modulatie	GFSK
ITU-indicator	F7D

De RC-A bevat een radiozendontvanger die gebruik maakt van Bluetooth Low Energy (BLE). De radiozender is zwak en altijd lager dan 10mW, gelijk aan 10 dBm totaal uitgestraald vermogen.

In verband met de beperkte ruimte op de RC-A zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

VS en Canada

Dit apparaat is gecertificeerd volgens:

FCC ID: 2ACAHREMCTR03

IC: 11936A-REMCTR03

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor de vergunningsvrijstelling van de Canadese Industrie

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur, en
2. dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Beschrijving van symbolen die in deze gids of op de verpakking gebruikt worden

	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool vermeld staan. Geeft fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-voorschriften 2017/745 en 2017/746.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan Richtlijn 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.
	Elektronisch afval (WEEE) Recycle uw hoortoestellen, accessoires of batterijen volgens lokale wetgeving of lever ze als afval in bij uw hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur valt onder voorschrift 2012/19/EU betreffende afval en elektronische apparatuur (waste and electrical equipment, WEEE).

	<p>Markering voor naleving van regelgeving Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, electromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw Zeelandse markt.</p>
	<p>Japans TELEC-symbool Geeft de markering aan voor gecertificeerde radio-apparatuur.</p>
<div data-bbox="132 553 289 638" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Complies with IMDA Standards DA103820 </div>	<p>IMDA-label Singapore Geeft aan dat het toestel voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en compatibel is met de publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en geen radiofrequente storing veroorzaakt aan andere geautoriseerde radiocommunicatienetwerken.</p>
	<p>Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel.</p>
	<p>Droog bewaren Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.</p>

 Bluetooth	<p>Bluetooth-logo Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., alle gebruik ervan vereist een licentie.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">REF</div>	<p>Catalogusnummer Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medisch hulpmiddel geïdentificeerd kan worden.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">SN</div>	<p>Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch hulpmiddel geïdentificeerd kan worden.</p>
	<p>Batterij Geeft het type batterij en wijze van plaatsing aan.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">UDI</div>	<p>Unieke apparaat-ID Geeft een provider aan die unieke apparaat-ID-informatie bevat.</p>

De fabrikant verklaart hierbij dat deze afstandsbediening voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant:



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.sbohearing.com



Afval van elektronische
apparatuur dient te worden
afgevoerd volgens de lokale
regelgeving.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

214490/NL

< >
8,15 mm

Placeholder for
FSC logo


^
< 19 mm

^
< 15 mm >
9,0 mm
v

Hoofdkantoor

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
www.bernafon.com



0000214490000001

bernafon®

Your hearing • Our passion